


DELUXE
MB/L4

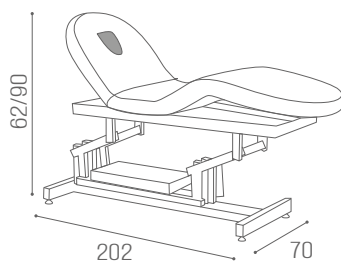

COLOURS A ○ B ●

Sécurité lors de l'installation

- Avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de la table de soin, lire attentivement le manuel d'instructions et suivre scrupuleusement toutes les indications et mises en garde qui y figurent. Il contient des informations importantes relatives à la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien du produit.
- Après avoir retiré l'emballage, vérifier l'intégrité et l'exhaustivité du contenu. En cas de doute, ne pas utiliser le produit et contacter notre service clientèle.
- La table Deluxe doit être installée sur une surface plane, nivelée et capable de supporter le poids de la table lorsqu'elle est chargée, conformément à la charge maximale admissible.
- Avant de brancher la table, s'assurer que la tension du réseau électrique (V) correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Sécurité lors de l'utilisation

- L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il a été expressément destiné. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et, par conséquent, dangereuse. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'utilisations inappropriées, incorrectes ou déraisonnables, lesquelles entraînent la perte de tout droit à la garantie.
- L'utilisation est réservée exclusivement au personnel réalisant le traitement (masseur ou esthéticien(ne)).
- Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Ne jamais approcher les pieds, les mains ou toute autre partie du corps des éléments mobiles de l'appareil, même lorsque ceux-ci ne sont pas en fonctionnement.
- Ne jamais débrancher la fiche de la prise électrique avec les mains mouillées. Ne pas débrancher la fiche en tirant sur le câble d'alimentation.
- En cas de chute de liquides ou de tout autre corps étranger à l'intérieur de l'appareil, débrancher immédiatement la table. Ne pas l'utiliser et contacter notre service clientèle avant toute nouvelle utilisation.
- Ne pas débrancher l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement. Pour le déconnecter, arrêter d'abord tous les mouvements, puis retirer la fiche de la prise électrique.
- Faire preuve de la plus grande vigilance lorsque l'appareil est utilisé sur des enfants, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.

Sécurité lors de l'entretien

- Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher la fiche électrique.
- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués uniquement par des personnes qualifiées et ne doivent pas être réalisés par des personnes ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil.
- Si les parties mobiles (matelas articulé ou châssis de levage) se bloquent, ne jamais tenter de les débloquent. Contacter le service après-vente de Medical & Beauty (Salon Habitat Italia srl).

Utilisation interdite

Ne jamais utiliser l'appareil Deluxe :

- Si le câble d'alimentation et/ou la fiche sont endommagés.
- Si l'enveloppe extérieure présente des dommages évidents.
- Après un éventuel renversement ou une chute au sol.

Dans tous ces cas, contacter immédiatement le service après-vente de Medical & Beauty (Salon Habitat Italia srl) afin d'effectuer les réparations nécessaires.

- Maintenir en permanence le câble d'alimentation éloigné des sources de chaleur ou des surfaces chaudes.
- Ne pas introduire ou laisser tomber d'objets ou d'eau dans les ouvertures et/ou les fentes de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur, dans des environnements humides, à proximité de lieux où sont utilisés des aérosols (sprays), ou dans des environnements où de l'oxygène est manipulé ou utilisé.
- Pour déconnecter l'appareil, arrêter tous les mouvements puis retirer la fiche de la prise électrique.

Utilisation prévue

La table de massage esthétique et de soins du visage/corps Deluxe est équipée d'un réglage électrique de la position et de la hauteur du matelas à deux articulations, commandé par une télécommande à boutons. Elle est dotée d'une structure en métal peint, d'un plateau rembourré recouvert de Skai souple, ainsi que d'un dossier avec ouverture faciale et bouchon de fermeture. Accoudoirs réglables en hauteur (optionnels).

Composants

La fig. 1 présente les principaux composants de la table de soins esthétiques Deluxe.

Légende :

1. Matelas à deux articulations
2. Ouverture faciale
3. Structure métallique
4. Télécommande à boutons
5. Accoudoirs (optionnels)

Fig. 1



Raccordement de la table Deluxe à l'alimentation électrique

- Vérifier que la tension du réseau électrique (V) correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil..
- Brancher la fiche dans la prise de courant.

Fonctionnement de la table Deluxe

Attention ! Risque d'écrasement. Les jambes, les bras et toute autre partie du corps du client/de l'opérateur doivent impérativement rester sur la table (client) et à l'écart des parties mécaniques (opérateur) pendant les opérations de réglage et de déplacement.


Éviter que l'huile ou tout autre produit chimique n'entre en contact avec le revêtement, car cela pourrait l'endommager.

Il est recommandé de protéger le revêtement, par exemple en utilisant des rouleaux de papier jetable (accessoire : porte-rouleau MB/A25).

Si de l'huile ou d'autres produits chimiques entrent en contact avec le revêtement, les retirer immédiatement.

La fig. 2 présente les commandes de la télécommande, dont l'utilisation est décrite ci-dessous.

Fig. 2

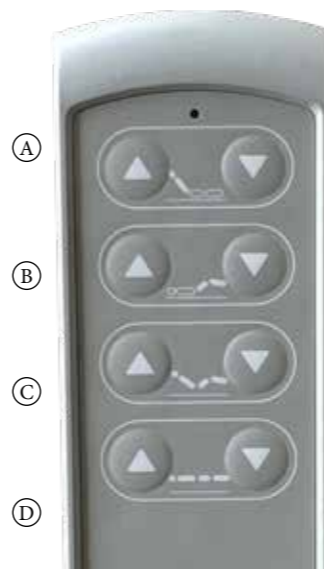

A. Réglage du dossier

Maintenir enfoncé le bouton de gauche pour relever le dossier jusqu'à la position souhaitée.

Maintenir enfoncé le bouton de droite pour abaisser le dossier jusqu'à la position souhaitée.

B. Réglage du repose-jambes

Maintenir enfoncé le bouton de gauche pour relever le repose-jambes jusqu'à la position souhaitée.

Maintenir enfoncé le bouton de droite pour abaisser le repose-jambes jusqu'à la position souhaitée.

C. Réglage simultané du dossier et du repose-jambes

Le dossier et le repose-jambes peuvent être réglés simultanément.

Maintenir enfoncé le bouton de gauche pour relever le dossier et le repose-jambes jusqu'à la position souhaitée.

Maintenir enfoncé le bouton de droite pour abaisser le dossier et le repose-jambes jusqu'à la position souhaitée.

D. Réglage de la hauteur de la table

Il est possible de régler la hauteur de l'ensemble de la structure du matelas afin de permettre à l'opérateur d'adopter une posture de travail appropriée.

Maintenir enfoncé le bouton de gauche pour relever la table jusqu'à la position souhaitée.

Maintenir enfoncé le bouton de droite pour abaisser la table jusqu'à la position souhaitée.

Nettoyage et entretien

Attention ! Risque de choc électrique ! Débrancher la fiche de la prise de courant avant toute opération de nettoyage.

Nettoyer le revêtement de la table uniquement avec de l'eau tiède, un savon neutre et un chiffon doux.

Les taches doivent être éliminées immédiatement afin d'éviter qu'elles ne pénètrent dans le revêtement.

Nettoyer le châssis de la table, la télécommande à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'unité de commande, la télécommande ni dans aucune des parties électriques.

Ne pas frotter de désinfectants sur le revêtement.

Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents agressifs susceptibles d'endommager le revêtement.

Ne pas utiliser de substances contenant de l'huile ou de la graisse pour nettoyer le revêtement.

Le revêtement n'est pas résistant aux produits chimiques ni aux produits de nettoyage à sec.

Réparation et maintenance

La table ne nécessite aucun entretien particulier lorsqu'elle est utilisée correctement et conformément aux indications et instructions du fabricant.

Toutefois, en cas de problème, veuillez contacter notre service clientèle. Seules les personnes autorisées par le fabricant sont habilitées à effectuer des réparations.

Toute modification ou réparation réalisée par des personnes non autorisées peut entraîner la perte de tout droit à la garantie. En outre, la sécurité de la table pourrait être compromise.

Transport / Stockage / Conditions d'utilisation

Le transport doit être effectué exclusivement dans l'emballage d'origine.

Température de transport et de stockage : de -20 °C à +50 °C.

Température d'utilisation : de +10 °C à +40 °C.

Humidité relative de l'air : 90 % maximum, sans condensation.

Éviter les variations brusques de température afin de prévenir la formation de condensation. Attendre que la table s'adapte à la température ambiante avant de la mettre en service.

Élimination

Les différents éléments de l'emballage, la table, le revêtement ainsi que les accessoires correspondants doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur établie par les autorités locales.

Tous les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des déchets ménagers.

Caractéristiques standard	U.D.M.	Valeur
Charge maximale	Kg	150
Tension d'alimentation	V ~	100/240
Fréquence	Hz	50-60
Puissance absorbée	W	150
Dimensions hors tout	Longueur Largeur Hauteur	mm 2020 mm 700 mm 620/900
Masse	kg	130
Niveau de pression acoustique au poste de travail - inférieur à 70 dB(A)		



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous : Salon Habitat (Italia) s.r.l.
Via Lazzaretti 12
42122 Reggio Emilia

déclarons sous notre entière responsabilité que le produit :

Table électrique Deluxe MB/L4

auquel se rapporte la présente déclaration est conforme aux normes suivantes :

EN 60335-1, amendements 2, 5, 6, A51, A53, A55
EN 60335-2-23, amendements A

et satisfait aux exigences des directives CEE suivantes :

- **Directive CEE 73/23 du Conseil du 9 février 1973 ; transposée par le décret-loi du 18 octobre 1977.**
- **Directive CEE 93/68 du Conseil du 22 juillet 1993 ; modifiant la Directive 73/23/CEE.**

Reggio Emilia, 08/06/2026

Le représentant légal
Sig. Michael Frost