



PODOLUX

MB/P30

MANUALE DI ISTRUZIONI

Sicurezza durante l'installazione

- Prima di procedere all'installazione e all'utilizzo della poltrona, leggere attentamente il manuale d'istruzioni avendo cura di seguire tutte le indicazioni e le avvertenze ivi contenute. Sono riportate importanti informazioni di sicurezza in fase di installazione, utilizzo e manutenzione del prodotto!
- Dopo aver tolto l'imballaggio verificare l'integrità e la completezza del contenuto. In caso di dubbi, non utilizzare il prodotto e contattare il nostro customer service.
- La poltrona Podolux va posizionata su di una superficie piana, livellata e in grado di sopportare il peso della poltrona quando l'apparecchiatura è caricata, facendo riferimento al carico massimo ammissibile.
- Prima di collegare la poltrona assicurarsi che la tensione (V) di rete sia corrispondente a quella riportata sulla targa dati della macchina.

Sicurezza durante l'utilizzo

- L'apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli, i quali comportano la perdita di ogni diritto di garanzia.
- L'utilizzo è consentito al solo personale che esegue il trattamento (podologo, estetista).
- I bambini non devono essere lasciati incustoditi in vicinanza dell'apparecchio.
- Per nessuna ragione avvicinare piedi, mani o altre parti del corpo alle parti mobili dell'apparecchiatura, anche quando queste non sono in funzione.
- In nessuna circostanza scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani bagnate. Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.
- Nel caso di un'eventuale caduta di liquidi o di qualsiasi altro corpo estraneo all'interno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la poltrona. Non utilizzare e rivolgersi al nostro customer service prima di utilizzare l'apparecchiatura nuovamente.
- Non scollegare l'apparecchio, mentre l'apparecchio è in funzione. Per disconnettere l'apparecchiatura, occorre prima fermare tutti i movimenti e solo successivamente staccare la spina dalla presa elettrica.
- Prestare la massima attenzione quando l'apparecchiatura viene utilizzata su bambini, persone anziane o disabili.

Sicurezza durante la manutenzione

- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o di pulizia staccare la spina elettrica.
- Pulizia e manutenzione devono essere effettuate soltanto da persone qualificate per tale attività e non devono essere effettuate da parte di persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Se le parti mobili (telaio e gambali) si bloccano, non cercare per nessun motivo di sbloccarle, ma contattare il servizio assistenza di Medical & Beauty.

Utilizzo vietato

Non usare mai l'apparecchiatura Podolux:

- Nel caso in cui il cavo di alimentazione e/o la spina siano danneggiati.
 - Nel caso in cui siano presenti evidenti danneggiamenti sull'involucro.
 - Dopo un eventuale rovesciamento o caduta sul pavimento.
- In tutti questi casi contattare immediatamente il servizio assistenza di Medical & Beauty per le riparazioni necessarie.
- Mantenere sempre il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o superfici calde.
 - Non fare cadere oggetti od acqua all'interno delle aperture e/o delle fessure.
 - Non usare l'apparecchiatura in ambienti esterni, in ambienti umidi, in prossimità di ambienti in cui viene utilizzato spray (aerosol), in prossimità di ambienti in cui viene gestito ed utilizzato l'ossigeno.
 - Per disconnettere l'apparecchiatura, fermare tutti i movimenti e solo dopo staccare la spina dalla presa elettrica.

Uso previsto

La poltrona Podolux è stata concepita per garantire il massimo del comfort durante i trattamenti estetici. La poltrona è dotata di regolazione elettrica di altezza, seduta, schienale e bascula. Pistoni a gas regolano i poggiatesta. Insieme alla possibilità di regolare l'altezza della seduta, i braccioli completamente ribaltabili rendono estremamente facile salire e scendere dalla poltrona. I braccioli sono stati concepiti per essere ribaltati in modo da offrire il massimo del comfort in tutte le posizioni.


Componenti

La fig. 1 riporta i principali componenti della poltrona per trattamenti estetici Podolux.

Legenda:

1. Poggiatesta, schienale
2. Braccioli
3. Poggiatesta
4. Pedale a pavimento per regolazione altezza, bascula sedile, schienale
5. Telecomando per regolazione altezza, bascula sedile, schienale

Fig. 1

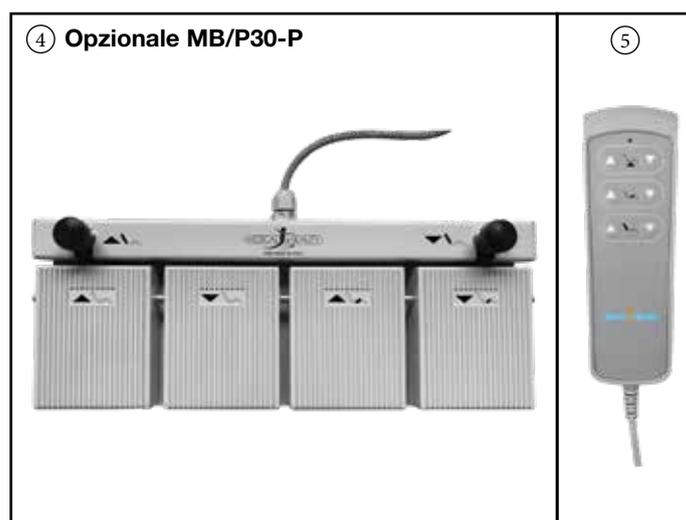

Connessione della poltrona Podolux alla corrente

- Verificare che la tensione (V) di rete sia corrispondente a quella riportata sulla targa dati della macchina.
- Attaccare la spina alla presa di corrente.

Operazioni della poltrona Podolux

Attenzione! Rischio di schiacciamento. Gambe, braccia e altre parti del corpo del cliente devono assolutamente rimanere sulla poltrona durante la regolazione e la movimentazione delle parti meccaniche.

Evitare che olio e altri prodotti chimici entrino in contatto con la tappezzeria, potrebbero danneggiarla.

Si consiglia di proteggere la tappezzeria ad esempio utilizzando rotoli di carta usa e getta.

Nel caso in cui dell'olio o altri prodotti chimici entrino in contatto con la tappezzeria rimuovere immediatamente.

Le operazioni di regolazione possono essere controllate sia tramite pulsantiera sia tramite pedaliera.

Regolazione dell'altezza della seduta

Utilizzare i comandi illustrati di seguito per alzare e abbassare la posizione della seduta a seconda delle necessità.



Regolazione della bascula seduta

Utilizzare i comandi illustrati di seguito per regolare la bascula seduta avanti e indietro a seconda delle necessità.



Regolazione dello schienale

Utilizzare i comandi illustrati di seguito per regolare la posizione dello schienale fino al raggiungimento della posizione desiderata.



Regolazione del poggiatesta

Il poggiatesta può essere regolato indipendentemente dallo schienale e dalla seduta, e può essere regolato:

- in lunghezza tramite un pomello in estensione
- in altezza tramite levetta di sollevamento
- in apertura

Regolazione dei braccioli

La posizione dei braccioli è sincronizzata al movimento dello schienale, e possono essere alzati o ribaltati per agevolare la salita e la discesa del cliente.

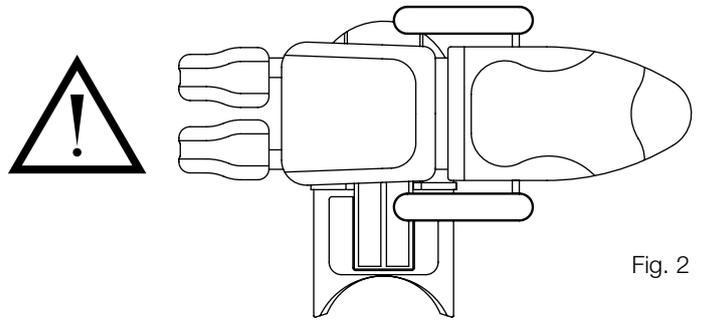


Fig. 2

Attenzione! Non utilizzare mai la poltrona con schienale reclinato come illustrato in fig. 2 PERICOLO DI RIBALTAMENTO

Pulizia e manutenzione

Attenzione! Pericolo di shock elettrico! Staccare la spina dalla presa prima di procedere alla pulizia.

Pulire la tappezzeria della poltrona solo con acqua tiepida, sapone neutro e un panno morbido.

Le macchie devono essere rimosse immediatamente per evitare che penetrino nel tessuto.

Pulire il telaio della poltrona e la pedaliera con un panno leggermente inumidito.

Assicurarsi che l'acqua non entri nell'unità di controllo, nella pedaliera e in tutte le parti elettriche.

Non strofinare disinfettanti sulla tappezzeria.

Non utilizzare prodotti chimici o detergenti aggressivi che potrebbero causare danni alla tappezzeria.

Non utilizzare sostanze che contengono olio o grasso per pulire la tappezzeria.

Il rivestimento non è resistente ai prodotti chimici e di lavaggio a secco.

Riparazione e manutenzione

La poltrona non richiede alcuna manutenzione speciale, se usata correttamente e in conformità con le indicazioni e le istruzioni del produttore.

Tuttavia, in caso di qualsiasi eventuale problema, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Solo le persone autorizzate dal produttore possono effettuare le riparazioni.

Eventuali modifiche o riparazioni eseguite da persone non autorizzate possono comportare la perdita di ogni diritto di garanzia.

Inoltre, la sicurezza della poltrona potrebbe essere compromessa.

Trasporto / Stoccaggio / Requisiti di utilizzo

Il trasporto deve avvenire esclusivamente all'interno dell'imballaggio originale.

Trasporto e conservazione a temperatura: da -20° C a +50° C

Temperatura di utilizzo: da +10° C a +40° C

Umidità relativa dell'aria: max. 90%, senza condensa

Evitare brusche variazioni di temperatura, per evitare la formazione di condensa. Attendere che la poltrona si adatti alla temperatura ambiente prima di metterla in funzione.

Smaltimento

Le diverse parti dell'imballaggio, la poltrona, la tappezzeria ed i relativi accessori devono essere smaltiti in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti urbani.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Noi: Salon Habitat (Italia) s.r.l.
Via Lazzaretti 12
42122 Reggio Emilia

Attestiamo sotto la nostra completa responsabilità che il prodotto:

Poltrona elettrica per trattamenti Podolux MB/P30

cui la dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme:

**EN 60335-1, modifiche 2, 5, 6, A51, A53, A55
EN 60335-2-23, modifica A**

ed ai requisiti delle seguenti direttive CEE:

**Direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 9 febbraio 1973; Attuazione della direttiva con D.L. del 18 ottobre 1977.
Direttiva CEE 93/68 del Consiglio del 22 luglio 1993; modifica alla 73/23 CEE**

Reggio Emilia, 01/01/2022

Il legale rappresentante
Sig. Michael Frost

Salon Habitat (Italia) s.r.l. via Lazzaretti 12 42122 Reggio Emilia
Sales Italia 0522 276740 International Sales 0522 276755 Fax 0522 276767
info@medicalandbeauty.com • www.medicalandbeauty.com



Manufacturer

Salon Habitat (Italia) s.r.l. via Enzo Lazzaretti, 12
42122 Reggio Emilia - Italy
www.salonambience.com
info@salonambience.com

Model

PODOLUX MB/P30 & MB/P31

Function

Beauty center massage chair/bed with
electric mechanism.

IEC Protection Class - II

Year of Manufacture - 2020 - 2021 - 2022

Power Supply

100/220-240 V~ 50-60 Hz



Nominal Power

90W

Maximum allowable load for the chair - 130 Kg